

Indications

Immobilisation rigide dans les suites de chirurgie du pied ou de la cheville (sur avis chirurgical) : chirurgie arthroscopique, ligamentaire, tendineuse, prothétique, arthrodèses et ostéotomies.
Immobilisation rigide des fractures stables du pied et de la cheville.
Immobilisation des entorses du pied et de la cheville.
Immobilisation dans le traitement chirurgical et médical des plaies ou ulcères de la cheville et du pied.
Immobilisation à visée antalgique en rhumatologie (arthropathie inflammatoire ou infectieuse).

Contre indications

Immobilisations strictes de la cheville et du pied (fractures instables) nécessitant un appareillage circulaire.
Probabilité de mauvaise observance de l'immobilisation.
Allergie aux composants.

Précautions d'utilisation

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. La botte de marche ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.
Pour éviter tout risque de blessure, faire preuve de prudence lors de déplacements sur des surfaces glissantes ou mouillées, ou lorsque la semelle caoutchouc est retirée.
Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste).

Recyclage/élimination

La botte seule est recyclable. Après avoir retiré la semelle extérieure, l'habillage, la semelle intérieure et les scratches, la botte peut être jetée dans un bac jaune.
L'habillage de la botte est recyclable, il peut être jeté dans les bacs de tri pour vêtements.
Les deux semelles et les scratches ne sont pas recyclables. Ils sont à jeter avec les ordures ménagères.

Entretien

L'habillage en mousse et le lycra sont lavables à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher à plat à l'air libre. Ne pas sécher en machine et ne jamais repasser.
La semelle est lavable à l'eau et au savon. Ne pas sécher en machine.
La botte est lavable à l'eau et au savon. Ne pas sécher en machine.

Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contacter Podonov.



AVERTISSEMENT



En cas de douleur intense (risque d'escarre si contact prolongé pathologique), de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste), et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site www.podonov.com
En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité du produit



Un seul patient - à usage multiple



Référence



Respecter les consignes d'utilisation



Lire la notice d'utilisation



Sans phtalates



Sans latex



Lavage à la main



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Séchage en machine ou à sec interdit



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Recyclable



Fabricant

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@podonov.com
www.podonov.com

Fabriqué en France

NOTICE D'UTILISATION



KiLi

Botte d'immobilisation*



Composition du colis :

Réf. KILI-STD-XS KILI-STD-S
KILI-STD-M KILI-STD-L




1 botte Kili complète composée :
- d'une botte plastique
- d'un habillage
- de 4 sangles velcro
- d'une semelle intérieure
- d'une semelle extérieure

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.


Mise en place de la semelle



1 Prendre la botte et la semelle.

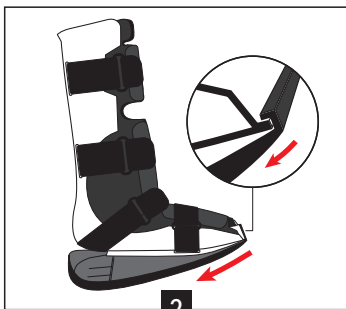

2 Engager la semelle sur la partie avant de la botte, attention de bien centrer la semelle.

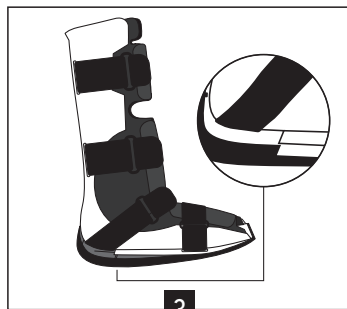


3 Appliquer la semelle sur la botte en appuyant de l'avant vers l'arrière.



4 Recourber la partie arrière de la semelle vers le bas pour l'encliqueter sur la botte.



5 Pousser la semelle vers le haut pour bien appliquer la partie arrière de la semelle sur le talon de la botte.

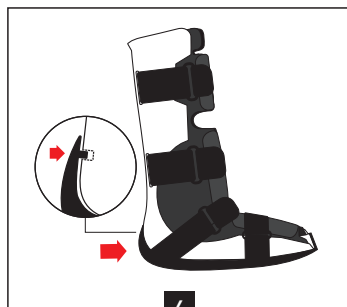


6 Engager le téton de la semelle dans le trou de la botte et appuyer pour l'insérer.

Changement d'habillage




1 Défaire les scratchs et les replier sur eux-mêmes pour éviter qu'ils s'emmêlent.

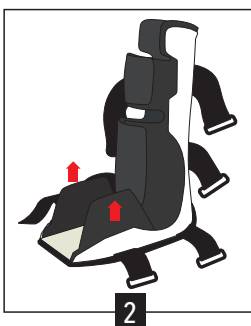

2 Ouvrir les parties avant de l'habillage en dé faisant le scratch et les retirer.



3 Retirer la partie arrière de l'habillage.

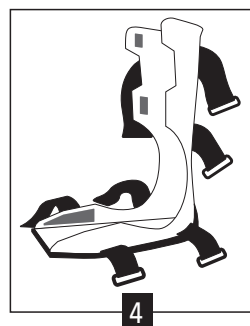

4 Botte nue sans habillage. Pour remettre l'habillage, procéder dans l'ordre inverse.


Mise en place de la botte




1 Prendre la botte avec la semelle montée.




2 Défaire les scratchs et les replier sur eux-mêmes pour éviter qu'ils s'emmêlent.

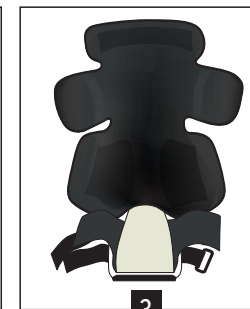


3 Ouvrir l'habillage de la botte en dé faisant les scratchs.

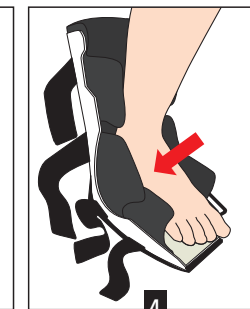


4 Glisser le pied dans la botte.

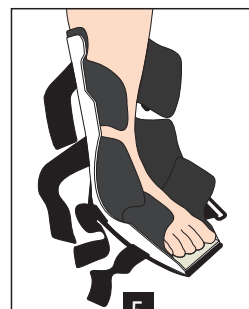


5 Fermer les parties de l'habillage de la botte en procédant comme suit.

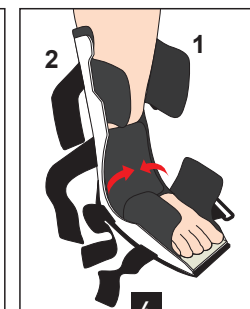


6 Commencer par la cheville :
1- Rabattre la partie gauche.
2- Rabattre la partie droite par-dessus et fixer le scratch.

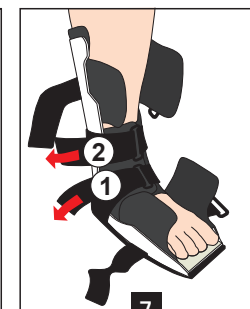


7 Bloquer la cheville avec la sangle velcro 1, puis la sangle 2.

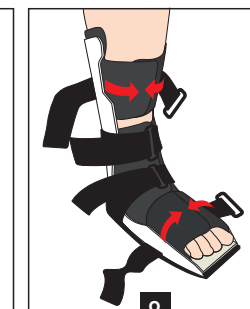


8 Fermer successivement les autres parties de l'habillage de la botte en procédant de la même manière.

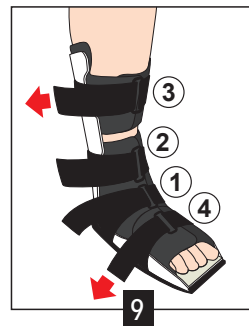


9 Puis passer toutes les sangles dans les boucles de fermeture et fixer tous les scratchs, les uns après les autres. Les resserrer en cas de besoin.

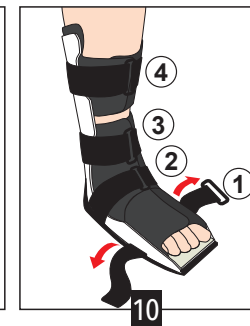

10 Pour retirer la botte défaire successivement les scratchs.

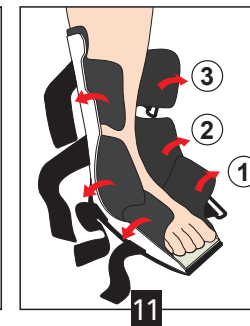

11 Défaire les 3 parties de l'habillage.

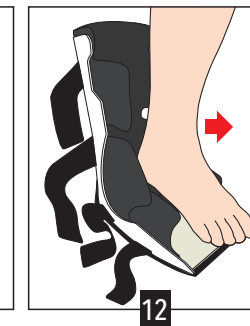

12 Retirer le pied.