

Indications

Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied: Hallux Valgus, orteils en griffes, fractures de l'avant-pied.

Post-traumatique, pieds oedémateux, rhumatoïdes, port de semelles correctrices épaisses.

Contre indications

Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas d'allergie aux composants.

Vérifier régulièrement l'état d'usure de la semelle extérieure. Ne pas utiliser en cas de détérioration.

En cas de douleur, de gonflement anormal, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en contact immédiatement avec le professionnel de santé concerné.

Précautions d'utilisation

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Faire preuve de prudence lors de déplacement sur des surfaces glissantes ou mouillées.

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, orthésiste).

Composition de la chaussure

Les tissus extérieur et intérieur ainsi que les lacets sont 100% coton.

Les oeilllets sont en fer recouverts de cuivre et de zinc, ils ne contiennent pas de nickel.

Les semelles de confort sont en polyuréthane recouvert de cuir.

Les semelles-entretoises sont en mousse d'EVA.

Entretien

Les chaussures sont lavables à l'eau et au savon sous un filet d'eau.

Les semelles sont lavables à l'eau et au savon sous un filet d'eau ou avec une compresse imbibée d'alcool.

Les semelles entretoises sont lavables à l'eau et au savon.

Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contacter Podonov.



AVERTISSEMENT



En cas de douleur intense (risque d'escarre si contact prolongé pathologique), de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste), et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site www.podonov.com

En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité du produit



Un seul patient – à usage multiple



Référence



Respecter les consignes d'utilisation



Lire la notice d'utilisation



Sans phthalates



Sans latex



Lavage à la main



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Séchage en machine ou à sec interdit



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@podonov.com
www.podonov.com

Fabriqué en France

NOTICE D'UTILISATION




ADAPTATIV* Chaussures thérapeutiques à usage temporaire



Composition de la boîte:

Réf. ADAPT-...NOIR-NOIR
ADAPT-...NOIR-GRIS

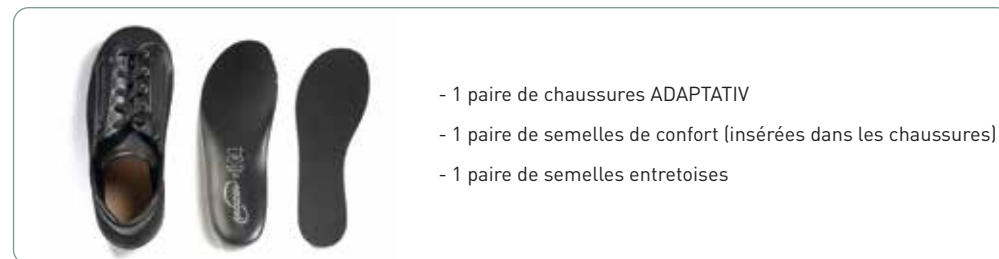

- 1 paire de chaussures ADAPTATIV
- 1 paire de semelles de confort (insérées dans les chaussures)
- 1 paire de semelles entretoises

*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

Présentation de la chaussure

La chaussure ADAPTATIV est une chaussure à usage thérapeutique temporaire (CHUT) de décharge de l'avant-pied. Elle a été développée pour s'adapter à la plupart des pathologies du pied. Grâce à son grand volume intérieur, elle convient aux pieds œdémateux, présentant des déformations d'orteils ou en post-opératoire des suites d'une chirurgie de l'avant-pied. La semelle extérieure relativement haute masque une semelle intérieure décaissée, permettant ainsi de cacher le port de semelles correctrices. Cette semelle extérieure est également large pour une meilleure stabilité et donne un confort de chaussage pour les pieds larges.

Un système de semelles entretoises vous permet de diminuer le volume intérieur de la chaussure ADAPTATIV et ainsi de garder vos chaussures plus longtemps une fois les pansements enlevés et les pieds dégonflés.

Le chaussage est simple et rapide grâce aux fermetures éclair. Les lacets permettent d'adapter le volume de la chaussure ADAPTATIV à chaque pied et le système de zip permet ensuite un chaussage/déchaussage aisé.

Utilisation des semelles entretoises

Les semelles entretoises permettent de diminuer le volume intérieur de la chaussure ADAPTATIV. Elles se placent dans la chaussure, sous la semelle de confort, comme expliqué sur les schémas ci-dessous.

Vous êtes opéré d'un seul pied:

Insérer la semelle entretoise dans la chaussure du pied non opéré.

La deuxième entretoise pourra être utilisée pour la chaussure du pied opéré lorsque celui-ci aura dégonflé et que vous souhaitez garder un peu plus longtemps les chaussures ADAPTATIV.

Vous êtes opéré des 2 pieds en même temps:

Les semelles entretoises pourront être utilisées lorsque les pieds auront dégonflé et que vous souhaitez ou devez continuer à porter les chaussures ADAPTATIV.



1
Ouvrir la chaussure en grand avec les zip



2
Extraire la semelle de confort du fond de la chaussure



3
Glisser votre semelle entretoise au fond de la chaussure



4
Remettre la semelle de confort sur la semelle entretoise

Mise en place des semelles correctrices



1
Ouvrir la chaussure en grand avec les zip



2
Extraire la semelle de confort de la chaussure



3
Glisser votre semelle correctrice de la chaussure

Première utilisation



1
Desserrer les lacets sans ouvrir les zips



2
Ouvrir la chaussure en grand en écartant les 2 pans latéraux



3
Glisser le pied dans la chaussure



4
Fermer la chaussure avec les lacets

Utilisation suivante

Une fois le réglage de la fermeture de la chaussure fait avec les lacets, utiliser uniquement les zips pour enfiler et retirer votre chaussure.



5
Réglage lacet fait



6
Utiliser les zips pour enfiler ou retirer la chaussure