

COMMENT RETIRER LA CUPULE ?

Facultatif

1



Saisir l'un des fils blancs

2



Couper la maille blanche la plus proche de la couture centrale noire

3



Tirer le fil blanc du côté de la maille coupée

4



Tirer tout en faisant le tour de la chaussette...

5



... jusqu'à la couture centrale

6



Couper la couture centrale du côté externe

7



ATTENTION, CETTE OPÉRATION EST DÉFINITIVE
Ôter la cupule - Terminé



Inclus une orthèse articulée de nuit,
à utiliser selon votre prescription médicale



La socquette Sonov est un dispositif de gestion de l'œdème post opératoire ou post traumatique, de l'avant pied (avant toute utilisation, demander conseil à votre professionnel de santé).

L'ŒDÈME, QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'œdème est une réaction physiologique faisant suite à une agression des tissus.

Il se caractérise par un gonflement exagéré des parties molles. La position verticale est un phénomène aggravant.

Au niveau du pied, l'œdème peut gêner le chaussage et provoquer des sensations d'étouffement et de brûlure.

Il apparaît rapidement après une chirurgie ou un traumatisme et disparaît en plusieurs mois.

LA CONTENTION MÉDICALE, NOTRE SOLUTION :

La contention médicale est un traitement qui permet de lutter efficacement contre l'augmentation et l'apparition de l'œdème au cours de la journée.

La contention est obtenue par l'utilisation d'un textile élastique qui va contenir sans comprimer l'œdème, grâce à une pression contrôlée.

La contention permet également d'améliorer la proprioception pour une réhabilitation plus rapide.

Notice d'utilisation SONOV 2022/07/V3

INDICATIONS :

La socquette de contention Sonov est particulièrement indiquée pour la prise en charge de l'œdème post-opératoire ou post-traumatique dans les cas de :

- Chirurgie de l'avant pied (*Hallux-Valgus - Griffe d'orteil*)
- *Ostéotomie des métatarses-Morton...*)
- Fractures de l'avant pied (*fractures de métatarses-fracture d'orteils...*)
- Entorse du Médio-Pied (*Lisfranc, Chopard*)...

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergies connues aux composants utilisés
- Artériopathie sévère
- Neuropathie Diabétique
- Infection cutanée, altération de l'état cutané, affection dermatologique suintante...

ENTRETIEN :

- Lavage en machine à 30° (programme délicat) sans assouplissant
- Séchage à plat conseillé et éloigné de toute source de chaleur

RECOMMANDATIONS :

Laver avant la première utilisation. Pour des raisons d'hygiène, la réutilisation de ce dispositif pour le traitement d'un autre patient est fortement déconseillée.

Les conditions d'utilisation et les durées de port des socquettes de contention Sonov sont définies par votre médecin prescripteur.

CONSEILS D'UTILISATION :

Les socquettes de contention Sonov s'enfilent comme une chaussette classique.

Utiliser sur une peau sèche et propre

Mettre le matin au lever du lit et porter en continu pendant toute la journée.

Si la socquette de contention a été enlevée dans la journée, ne pas la remettre si l'œdème est apparu.

La socquette Sonov peut être associée au port d'un dispositif de contention médical (chaussette, bas ou collants).

Vous avez la possibilité d'ôter la cupule recouvrant les orteils, en suivant le mode d'emploi visible au recto.

Attention, cette opération est définitive.

EN CAS :

- D'augmentation de la douleur à la mise en place du dispositif
- D'anesthésie (endormissement) des orteils
- D'orteils blancs
- De sensation de compression trop importante du pied
- De douleur, attendre que l'œdème dégonfle un peu et réessayer plus tard

Retirer immédiatement le dispositif et rapprochez-vous du professionnel qui a prescrit le produit

LES ATOUTS DE LA SOQUETTE DE CONTENTION SONOV :

Universelle (la socquette Sonov s'utilise indifféremment au pied droit ou au pied gauche).

- 1 - PADS de protection latéraux avec un effet massant pour l'amélioration de la cicatrice.
- 2 - Cupule non compressive et amovible.
- 3 - Taillage élargie à la cheville facilite la mise en place.
- 4 - Partie non compressive au-dessus des malléoles pour éviter un effet garrot.
- 5 - Zone de contention



Réassurance à la marche par un effet proprioceptif externe de type strapping.

COMPOSITION :

Polyamide 59% - Polyester 29% - Elasthane 12%

Fabriqué en France

sonov

la socquette de contention par Podonov



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité du produit



Un seul patient - à usage multiple



Sans phthalates



Sans latex



Référence



Respecter les consignes d'utilisation



Lire la notice d'utilisation



Laver à 30 degrés



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Séchage en machine ou à sec interdit



Podonov
3 rue de Villebon 91160 Saulx les Chartreux.
www.podonov.com