



KiLi

Cales Achille Kili*



Composition du colis :


Réf. KILI-CALE-ACHILLE



4 cales superposables




Les cales sont livrées fixées
les unes sur les autres

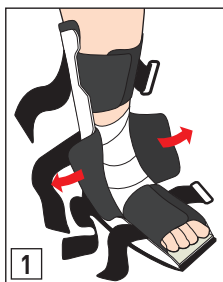


1

Défaire les 2 scratchs de la cheville et ouvrir l'habillage en grand.

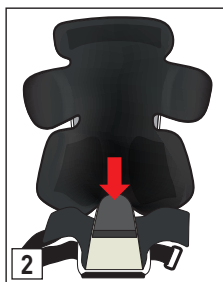


2

Placer les cales à l'intérieur de la botte. La partie arrière de la cale doit être positionnée contre le fond de la botte.

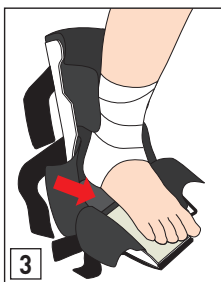

3

Remplacer la jambe à l'intérieur de la botte de marche, en positionnant le talon bien au dessus des cales.

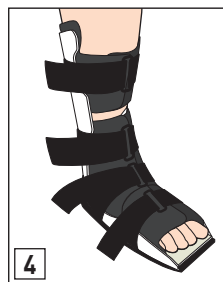

4

Refermer chaque sangle de la botte.



Les cales sont livrées fixées les unes aux autres par ordre de longueur, la plus courte se situant toujours au plus haut.



Pour diminuer la hauteur, toujours retirer la cale du dessous (d'abord la N°4, puis la n°3, puis la n°2, avant de pouvoir retirer la n°1, selon les préconisations de votre médecin).

Indications

Soins postopératoires de plasties de reconstruction ou de réinsertion du tendon d'Achille, chirurgie de transfert du tendon du long fléchisseur de l'hallux. Prise en charge des ruptures du tendon d'Achille non opérées, tendinopathies chroniques ou dégénératives du tendon d'Achille, maladie de Haglund.

Contre-indications

Pas d'autres usages que ceux prévus par les indications.

Risques à l'utilisation et précautions d'emploi

Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste, etc.). Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. Ne pas utiliser en cas de dégradation. Ne pas laisser à la portée des enfants et des personnes incapables à l'utilisation de ce dispositif.

Ne pas jeter le dispositif dans la nature, ni avec les ordures ménagères. La mise au rebut se fait avec les déchets industriels spéciaux, en déchetterie.

Entretien

Les cales sont lavables à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et ne jamais utiliser d'eau de Javel. Laisser sécher l'ensemble à plat à l'air libre.

Ne pas immerger dans un bain détergent désinfectant. Si besoin, pulvériser une solution détergente désinfectante (ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes).



AVERTISSEMENT



En cas de douleur, de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical, consulter au plus vite votre professionnel de santé habilité, chirurgien, médecin, pharmacien, et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site www.podonov.com
En cas de réaction grave, contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité du produit



Un seul patient - à usage multiple



Référence



Date limite d'utilisation



Température limite



Lire la notice d'utilisation



Respecter les consignes d'utilisation



Sans phtalates



Sans latex



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Lavage à la main



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Séchage en machine ou à sec interdit



Dangereux pour l'environnement



Fabricant

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France

Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: contact@podonov.com

www.podonov.com