

## Indications

Suites opératoires d'une chirurgie de l'avant-pied:  
Hallux Valgus, orteils en griffe, fractures de l'avant-pied.

## Contre indications

Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas d'allergie aux composants. Vérifier régulièrement l'état d'usure de la semelle extérieure. Ne pas utiliser en cas de détérioration. En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou de toute autre réaction anormale lors de l'utilisation de ce produit, se mettre en contact immédiatement avec le professionnel de santé concerné.

## Précautions d'utilisation

Le fabricant n'offre aucune garantie que l'utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue d'une blessure. La chaussure ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée. Faire preuve de prudence lors de déplacement sur des surfaces glissantes ou mouillées. Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou selon les préconisations d'utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien, orthésiste).

## Composition de la chaussure

Les tissus extérieur et intérieur, ainsi que les lacets, sont 100% coton.  
Les œillets sont en fer recouvert de cuivre et de zinc, et ne contiennent pas de nickel.  
Les semelles de confort sont en polyuréthane recouvert de cuir.  
Les semelles-entretoises sont en élastomère de cellulose.

## Entretien

Les chaussures HALTEN en toile:  
- Laver à l'eau et au savon sous un filet d'eau. Ne pas sécher en machine. **Ne jamais laver en machine.**

Les chaussures HALTEN en cuir:  
- Entretien le cuir à l'aide d'une crème nourrissante ou de cirage. **Ne jamais laver en machine.**

Les semelles de confort sont lavables à l'eau et au savon sous un filet d'eau ou avec une compresse imbibée d'alcool.

Les semelles entretoises sont lavables à l'eau et au savon.

Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contacter Podonov.



## AVERTISSEMENT



En cas de douleur intense (risque d'escarre si contact prolongé pathologique), de gonflement, de sensations inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l'utilisation du dispositif médical et consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute, orthésiste), et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site [www.podonov.com](http://www.podonov.com)

En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité compétente en France.



Dispositif médical



Conforme aux exigences de l'Union Européenne



Tracabilité du produit



Un seul patient - à usage multiple



Référence



Respecter les consignes d'utilisation



Lire la notice d'utilisation



Sans phtalates



Sans latex



Lavage à la main



Ne pas javelliser



Ne pas repasser



Séchage en machine ou à sec interdit



Ne pas ouvrir avec un objet coupant



Fabricant

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France  
Tél.: 01 60 13 65 72 - Fax: 01 69 15 06 37 - Courriel: [contact@podonov.com](mailto:contact@podonov.com)  
[www.podonov.com](http://www.podonov.com)

Fabriqué en France

NOTICE D'UTILISATION




# HALTEN\*

## Chaussures thérapeutiques à usage temporaire



Réf. POD1010  
POD1020

## Composition de la boîte:

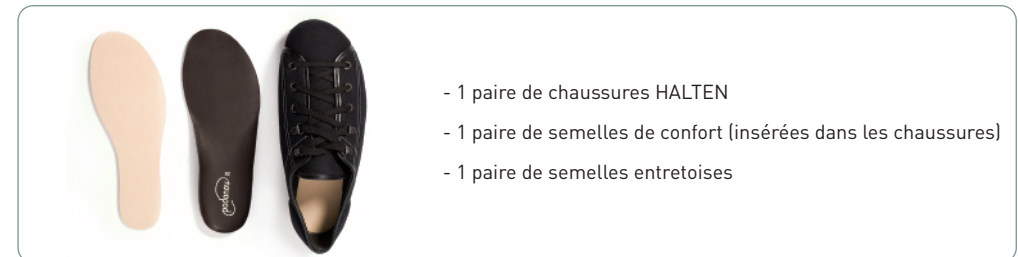

- 1 paire de chaussures HALTEN
- 1 paire de semelles de confort (insérées dans les chaussures)
- 1 paire de semelles entretoises

Notice d'utilisation HALTEN 2023/02/V4

\*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

## Présentation de la chaussure

La chaussure HALTEN est une chaussure thérapeutique à usage temporaire (CHUT) de décharge de l'avant pied. Elle a été développée pour recevoir les pansements post opératoires et ainsi permettre de remarcher tout de suite après une intervention chirurgicale. Un système de semelles entretoises permet de diminuer le volume intérieur des chaussures HALTEN pour ainsi s'adapter au pied non opéré. Grâce à ce système, il est aussi possible de les porter plus longtemps une fois le pansement enlevé et le pied dégonflé. Les semelles de confort sont amovibles et peuvent être remplacées par des semelles de correction orthopédique.

## Utilisation des semelles entretoises

Les semelles entretoises permettent de diminuer le volume intérieur de la chaussure HALTEN. Elles se placent dans la chaussure, sous la semelle de confort, comme expliqué sur les schémas ci-dessous.

Vous êtes opéré d'un seul pied:

Insérer la semelle entretoise dans la chaussure du pied non opéré.

La deuxième entretoise pourra être utilisée pour la chaussure du pied opéré lorsque celui-ci aura dégonflé et que vous souhaitez garder un peu plus longtemps les chaussures HALTEN.

Vous êtes opéré des 2 pieds en même temps:

Si vous souhaitez ou devez continuer à porter les chaussures HALTEN, les semelles entretoises pourront être utilisées lorsque vos pieds auront dégonflé.



1  
Desserrer les lacets afin de bien ouvrir la chaussure



2  
Enlever la semelle de confort (noire) de la chaussure



3  
Glisser votre semelle entretoise dans la chaussure



4  
Remettre la semelle de confort par-dessus la semelle entretoise

## Mise en place de la chaussure Option 1

Votre pansement rentre dans la chaussure sans douleur:



1  
Bien desserrer les lacets jusqu'à la pointe et relever la languette au maximum



2  
Glisser le pied avec le pansement dans la chaussure



3  
Serrer les lacets

## Mise en place de la chaussure Option 2

Votre pied et vos pansements sont trop volumineux pour rentrer dans la chaussure fermée, vous pouvez mettre la chaussure comme indiqué ci-dessous




1  
Enlever la semelle de confort du fond de la chaussure



2  
Desserrer les lacets au maximum afin de favoriser le passage du pied



3  
Bien plaquer la languette au fond de la chaussure

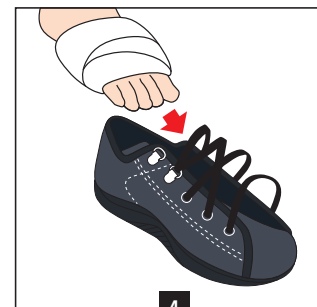

4  
Glisser le pied sous les lacets et sur la languette



5  
Resserer les lacets directement sur le pansement